

## Allegato 1: Istruzioni brevi conservazione e invio esami citologici

CAMPIONE	PREPARAZIONE E PAZIENTE	FISSATIVO	A FRESCO ENTRO ORE 14.30	CONTENITORE
URINE	SI vedi procedura	FIXUR O ANALOGO	NO	FIXUR O ANALOGO MAGAZZINO FARM.
ESCREATO	SI vedi procedura	LIQUIDO DI SACCOMANNO	NO	<b>LIQUIDO DI SACCOMANNO</b> AN. PATOLOGICA (tel.2282)
LIQUIDO PLEURICO- PERITONEALE- PERICARDICO ECC. LIQUIDI DI LAVAGGIO (ASSI ESCRETORI-URETERI-PELVI) CISTI RENALI	NO	SI DOPO LE 14.30	SI	<b>FORMALINA:</b> PRERIEMPITI A MAGAZZINO
ASPIRATO DA LESIONI CISTICHE (TIROIDE, MAMMELLA, ECC.) LIQUIDO SEMINALE	NO	SI DOPO LE 14.30	SI	<b>FORMALINA:</b> PRERIEMPITI A MAGAZZINO
LIQUIDO CEFALORACHIDIANO	NO	LIQUIDO DI SACCOMANNO	SI per colorazione MGG	<b>LIQUIDO DI SACCOMANNO:</b> ANATOMIA PATOLOGICA (tel. 2282)
TBNA-EUS-EBUS	NO	FORMALINA	NO	<b>FORMALINA:</b> PRERIEMPITI A MAGAZZINO
BRONCOASPIRATO / BRONCOLAVAGGIO	NO	LIQUIDO DI SACCOMANNO	NO	<b>LIQUIDO DI SACCOMANNO:</b> ANATOMIA PATOLOGICA (tel. 2282)
BRUSHING BRONCHIALE	NO	FORMALINA	NO	<b>FORMALINA:</b> PRERIEMPITI A MAGAZZINO
Vetrini strisciati da: AGOASPIRATO e/o SCRAPING		FISSATI CON CITOSPRAY	FISSATI ALL'ARIA	<b>CITOSPRAY:</b> A MAGAZZINO FARM.
LINFONODO	----	1 su 3 vetrini	2 su 3 vetrini	VETRINI A MAGAZZINO
TIROIDE	----	1 su 3 vetrini	2 su 3 vetrini	VETRINI A MAGAZZINO
MAMMELLA	----	SI	NO	VETRINI A MAGAZZINO
GHIANDOLE SALIVARI	----	2 su 3 vetrini	1 su 3 vetrini	VETRINI A MAGAZZINO
ESOFAGO/GASTRICO	----	SI	NO	VETRINI A MAGAZZINO
GRASSO PERIOMBELICALE PER RICERCA AMILOIDE	----	NO	SI	VETRINI CON CARICA POSITIVA ANATOMIA PATOLOGICA (tel 2282)
APPOSIZIONI BIOPSIE OSTEOMIDOLLARI PER COLORAZIONE FERRO	----	NO	SI	VETRINI CON CARICA POSITIVA ANATOMIA PATOLOGICA (tel 2282)
STRISCIO SANGUE MIDOLLARE PER COLORAZIONE MGG	----	NO	TUTTI FISSATI ALL'ARIA	VETRINI A MAGAZZINO